

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
Флакони от 250 мл с дозираща помпа и 1000 мл бутилка с дозираща помпа.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

MASTITIS TEST NK – ad us.vet.

МАСТИТЕН ТЕСТ NK – за ветеринарномедицинска употреба

Бърз тест за доказване заболявания на вимето при дойни крави

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция : Detergent /Alson tea/ 100 g/1000 ml

Ексципиенти : Phenol red, Destilled water

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

250 мл, 1000 мл

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Бърз оборен тест за установяване на заболявания от мастит крави.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Провеждане на теста: Смесват се 2 мл пресно издоено краве мляко с 2 мл от продукта в паничката на оценъчната плочка. Реакцията обикновено започва след 30 секунди и се отчита при леко наклоняване на плочката.

Bioveta доставя при поискване пласмасови оценъчни плочки с отбелязани 2 мл за всяка паничка.

Процедура за измерване на млякото на плочката с отбелязани 2 мл.

1. Издоява се малко мляко от всяка четвъртина в съответната паничка на плочката.

2. Плочката се наклонява в направление срещу нейната дръжка за да се отстрани излишното мляко, така, че нивото на млякото да показва 2 мл.

Дозираща процедура на НК маститен тест с дозировъчна помпа:

- 1.Отключва се помпата от транспортна позиция в направление на стрелката / отворено /.
- 2.Първата доза след отваряне на помпата се изпръсква навън / системата на помпата е напълнена /.
- 3.Всяко следващо натискане на помпата е равно на 2 мл (опакровка от 250 мл). Всеки две натискания на помпата се равняват на 2 мл (опакровка от 1000 мл).
- 4.Във всяка паничка от оценъчната плочка чрез едно (или две) натискания на помпата се дозират 2 мл от продукта.

Отчитане на теста: Положителната реакция се проявява с формиране на късчета, нишки или гел с различен интензитет. В случай на силно положителни реакции гелът след неговото формиране се събира в центъра на паничката. Едновременно с това, се проявява една различна цветна реакция чрез промяна в рН на цветния индикатор. Положителна реакция се проявява когато количество на клетъчните елементи надвишава 200.000 в 1 мл.

8. КАРЕНТЕН СРОК

Карентен срок: Не е приложимо.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от замръзване.

Да не се използва продукта след изтичане срока на годност означен на опаковката.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ВМП или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство

13. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ, ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба.

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ „ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА
ТЪРГОВИЯ**

Bioveta, a.s., Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Czech Republic
Тел.: 00420 517 318 502, Факс : 00420 517318 653, e-mail: comm@bioveta.cz

16. НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-1962

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида №



Recoverable Signature

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV