

ЛИСТОВКА ЗА :

MASTITIS TEST NK – ad us. vet.

МАСТИТЕН ТЕСТ NK – за ветеринарномедицинска употреба

Бърз тест за доказване заболявания на вимето при дойни крави

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Bioveta, a.s., Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Czech Republic

Тел.: 00420 517 318 502, Факс : 00420 517318 653, e-mail: comm@bioveta.cz

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

MASTITIS TEST NK – ad us.vet.

МАСТИТЕН ТЕСТ NK – за ветеринарномедицинска употреба

Бърз тест за доказване заболявания на вимето при дойни крави

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

Активна субстанция :

Detergent / Alson tea / 100 g/1000 ml

Ексципиенти

Phenol red, distilled water

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Бърз оборен тест за установяване на заболели от мастит крави.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Не е приложимо.

Ако забележите някакво сериозно въздействие или други ефекти вследствие от употребата на този ВМП, които не са описани в тази листовка, моля незабавно да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

Провеждане на теста : Смесват се 2 мл пресно издоено краве мляко с 2 мл от продукта в паничката на оценъчната плочка. Реакцията обикновено започва след 30 секунди и се отчита при леко наклоняване на плочката.

Bioveta доставя при поискване пласмасови оценъчни плочки с отбелязани 2 мл за всяка паничка.

Процедура за измерване на млякото на плочката с отбелязани 2 мл.

1. Издоява се малко мляко от всяка четвъртина в съответната паничка на плочката.
2. Плочката се наклонява в направление срещу нейната дръжка за да се отстрани излишното мляко, така, че нивото на млякото да показва 2 мл.

Дозираща процедура на НК маститен тест с дозировъчна помпа:

1. Отключва се помпата от транспортна позиция в направление на стрелката / отворено /.
2. Първата доза след отваряне на помпата се изпръсква навън / системата на помпата е напълнена /.
3. Всяко следващо натискане на помпата е равно на 2 мл (опакровка от 250 мл). Всеки две натискания на помпата се равняват на 2 мл (опакровка от 1000 мл).
4. Във всяка паничка от оценъчната плочка чрез едно (или две) натискания на помпата се дозират 2 мл от продукта.

Отчитане на теста : Положителната реакция се проявява с формиране на късчета, нишки или гел с различен интензитет. В случай на силно положителни реакции гелът след неговото формиране се събира в центъра на паничката. Едновременно с това, се проявява една различна цветна реакция чрез промяна на рН на цветния индикатор. Положителна реакция се проявява когато количество на клетъчните елементи надвишава 200.000 в 1 мл.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Няма.

10.КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25°C.

Да се пази от замръзване.

Да не се използва продукта след изтичане срока на годност означен на опаковката.

12.СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Положителна реакция може също да се наблюдава при здрави крави в началото на лактационния период / първите 3 - 5 дни, по изключение за повече дни / и непосредствено преди отелване. Реакцията може да се наблюдава също в периода на разгонване, при внезапна смяна на храната и т.н. В тези случаи, реакциите на всичките 4 четвъртини показват еднаква интензивност.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Всеки неизползван ВМП или остатъци от него, ако има такива, трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА
10/2024

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ВМП, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.



Recoverable Signature

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV